

คู่มือการตรวจเช็คประจำ

เครื่องกระทงหัวใจ ยี่ห้อ Philips

1. **Selftest ระบบ** โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - ต่อสาย Test Load เข้ากับตัวเครื่องและ Test Load ก่อน
 - ปรับปุ่มหมุนหน้าเครื่องไปที่โหมด Monitor
 - กดปุ่มหมุนเพื่อเลือกเมนู
 - หมุนเลื่อนหาหัวข้อ Other และกดเลือก
 - หมุนเลื่อนหา Operationcheck และกดเลือก
 - หมุนเลื่อนหา Run OP check และกดเลือก
 - กดยืนยันเพื่อเข้าสู่หน้า Selftest
 - ปรับปุ่มหมุนกำลังไฟไปที่ 170 Jul
 - ปรับปุ่มหมุนกำลังไฟไปที่ 150 Jul พร้อมกด Charge และ Shock หน้าเครื่อง
 - กดยืนยันระบบเสียง
 - กดปุ่ม Sync หน้าเครื่อง
 - รอจนเครื่อง Test ระบบจนสิ้นสุด เครื่องจะปริ้นท์กระดาษออกมา (หากใส่กระดาษไว้)
 - กด Exit ปุ่มด้านล่างจอ ซ้ายมือสุดเพื่อเข้าหน้าปกติ
 - (ปล.หากไม่เคร่งครัดมากสามารถทำ Selftest 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้)
2. **ตรวจสอบความสว่างหน้าจอ** ว่าแสงมองตัวเลขภายในชัดหรือไม่
3. **ตรวจสอบสายไฟต่างๆ** ว่ามีรอยฉีกขาด/ชำรุด ใช้งานไม่ได้หรือไม่

4. **ตรวจสอบอุปกรณ์พ่วง** ว่าครบ/ไม่ครบ หรือไม่ เช่น Lead ECG , Probe Sensor

5. **ตรวจสอบโครงเครื่องภายนอก** ว่ามีรอยแตก/ชำรุด หรือไม่



จบขั้นตอนการตรวจเช็คประจำ
จัดทำโดย ศูนย์เครื่องมือแพทย์