

คู่มือการตรวจเช็คประจำ

เครื่องกระตุกหัวใจ ยี่ห้อ **Zoll**

1. **Selftest ระบบ** โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - ปรับปุ่มหมุนหน้าเครื่องไปที่โหมด Defib
 - ปรับแรงไฟลงมาให้เหลือ 30 Jul
 - กด Charge และกด Shock ที่ซึ่งบริเวณเก็บชุด Padle
 - หากเสร็จสิ้น เครื่องจะปริ้นท์กระดาษออกมา (หากใส่กระดาษไว้)
 - (ปล.หากไม่เคร่งครัดมากสามารถทำ Selftest 1 ครั้งต่อสัปดาห์ได้)
2. **ตรวจสอบความสว่างหน้าจอ** ว่าแสงมองตัวเลขภายในชัดหรือไม่
3. **ตรวจสอบสายไฟต่างๆ** ว่ามีรอยฉีกขาด/ชำรุด ใช้งานไม่ได้หรือไม่
4. **ตรวจสอบอุปกรณ์ฟาง** ว่าครบ/ไม่ครบ หรือไม่ เช่น Lead ECG , Probe Sensor
5. **ตรวจสอบโครงเครื่องภายนอก** ว่ามีรอยแตก/ชำรุด หรือไม่



จบขั้นตอนการตรวจเช็คประจำ
จัดทำโดย ศูนย์เครื่องมือแพทย์